


1. **Verwijder** het achterstuk.



2. **Draai** de **AeroChamber®** zoals op de afbeelding om het voorstuk los te maken.

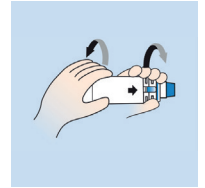

3. **Laat** de onderdelen 15 minuten weken in een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en lauw, schoon water.

4. **Beweeg** de onderdelen voorzichtig heen en weer en spoel af in schoon water.



**Of**  
**Plaats** de onderdelen in het bovenste rek van de vaatwasser.





**AeroChamber®** met **MONDSTUK**: zorg ervoor dat het mondstuk naar boven wijst.

**AeroChamber®** met **MASKER**: zorg ervoor dat het masker met het zachte deel naar boven wijst.


Stel de vaatwasser in op een normaal of licht programma, zonder de keuze 'extra droog'.

5. **Schud** het overtollige water af en laat de onderdelen rechtop aan de lucht drogen of droog met een zachte doek. Zorg ervoor dat de onderdelen droog zijn voordat u deze weer in elkaar zet.

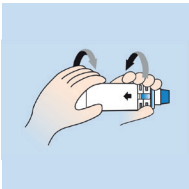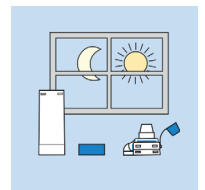

6. **Monteer** het voorstuk aan het uiteinde van de **AeroChamber®** en draai het stevig vast.

7. **Centreer** de uitlijnfunctie op de achterkant met de **Flow-Vu®** inhalatie-indicator. Druk het achterstuk stevig vast.

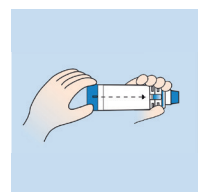

## BELANGRIJK

- Als u merkt dat medicatie zich in de **AeroChamber®** ophoopt, reinig dan de binnenkant van de voorzetkamer voorzichtig met een zachte doek.
- Het wordt afgeraden om de onderdelen gelijktijdig met een te vuile vaat in de vaatwasser te reinigen.
- Gebruik een glansspoelmiddel als u de **AeroChamber®** in de vaatwasser schoonmaakt.
- Niet koken of steriliseren. De **AeroChamber®** kan permanent worden beschadigd als het in de vaatwasser wordt gereinigd bij een temperatuur boven de 70°C.
- Volg de instructies van de dosisaërosol voor het reinigen.



**Handige bewaartas**

Scan de QR-code en vraag 'm gratis aan!

