



De AeroChamber2go™ kan in combinatie met de meeste dosisaërosolen worden gebruikt om de medicatie te inhaleren.

Vóór elk gebruik

De voorzetkamer kan direct na het uitpakken worden gebruikt. Let erop dat u vóór gebruik deze instructies en de bij de inhalator geleverde instructies zorgvuldig leest. Controleer de voorzetkamer nauwkeurig en vervang deze onmiddellijk als deze beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.

Opmerkingen

- De voorzetkamer moet na 12 maanden gebruik worden vervangen.
- De voorzetkamer bevat geen latex.
- Deel dit medisch hulpmiddel niet.


Voorzichtigheid

- Laat de voorzetkamer niet onbewaakt achter bij kinderen. Dit is geen speelgoed.
- De voorzetkamer kan permanent worden beschadigd als het wordt gekookt, gesteriliseerd of gereinigd in een vaatwasser bij een temperatuur boven de 70°C.




Schud

de dosisaërosol vlak voor gebruik (verwijder de dop).

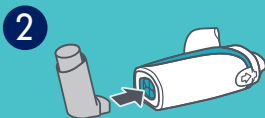

Plaats

de dosisaërosol in het achterstuk van de AeroChamber2go™.

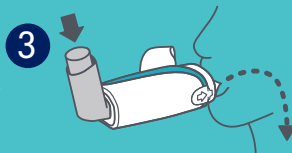

Druk

de dosisaërosol in terwijl u **langzaam en diep** inademt.

De dosisaerosol opbergen



Open

de AeroChamber2go™. Verwijder de dop van de dosisaerosol voordat u deze opbergt in de AeroChamber2go™.



Schuif

de inhalator in de AeroChamber2go™ en sluit beide uiteinden.

Distributeur in Nederland: Focus Care Pharmaceuticals B.V., Westzijde 416, 1506 GM Zaandam
E-mail: aerochamber@focuscare.nl, Tel. 085-7920800