

AeroChamber[®]

Plus Flow-Vu[®]

Antistatische voorzetskamer

GEBRUIKSINSTRUCTIE KINDEREN

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Deze antistatische voorzetskamer kan direct na het uitpakken worden gebruikt. Lees de instructies van de **AeroChamber[®]** voorzetskamer en de gebruiksaanwijzing van uw dosisaerosol zorgvuldig door en bewaar deze. Controleer de **AeroChamber[®]** voorzetskamer goed en reinig deze als er stof of vuil in aanwezig is. Vervang de **AeroChamber[®]** voorzetskamer direct als deze beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.

VOOR GEBRUIK MET DOSISAEROSOL (PUFFER)

Volg de instructies van de dosisaerosol voor het gebruik.



STAP 1. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als van de **AeroChamber[®]**.



STAP 2. Schud de dosisaerosol vlak voor gebruik volgens de meegeleverde instructie.



STAP 3. Plaats de dosisaerosol in het achterstuk van de **AeroChamber[®]**.



STAP 4 (met mondstuk). Adem langzaam uit. Plaats het mondstuk in de mond en sluit de lippen er goed omheen voor een goede afsluiting.



STAP 4 (met masker geel). Laat het kind volledig uitademen. Zet het masker op en zorg dat het goed op het gezicht aansluit.



STAP 4 (met masker oranje). Neem het kind op schoot en zorg dat het rechtop met de rug naar u toe zit. Wanneer uw kind onrustig is, helpt het als u zelf kalm bent. Zet het masker op en zorg dat het goed op het gezicht aansluit.



STAP 5 (met mondstuk). Druk de dosisaerosol één keer in aan het begin van een rustige inademing. Adem vervolgens 3-5 keer** in en uit door de **AeroChamber[®]**, met het mondstuk stevig tussen de lippen voor een goede afsluiting.



ÓF Druk de dosisaerosol één keer in aan het begin van een rustige inademing. Adem langzaam en diep in door de **AeroChamber[®]**. Houd vervolgens 5-10 seconden de adem vast en adem daarna rustig uit.



STAP 5 (met masker geel). Druk de dosisaerosol één keer in aan het begin van een rustige inademing. Zorg dat het masker op zijn plaats blijft en laat het kind 5-6 keer inademen door de **AeroChamber[®]**.



STAP 5 (met masker oranje). Druk de dosisaerosol één keer in aan het begin van een rustige inademing. Houd het masker op zijn plaats en controleer met de **Flow-Vu[®]** inhalatie-indicator of het kind 5-6 keer heeft ingeademd.

** 2-3x volgens Trudell gebruiksinstructies, 5x volgens IMIS en inhalatorgebruik.nl



Distributeur in Nederland

 **FOCUSCARE**
MEDICAL

 focuscare.nl

BEOOGD GEBRUIK

De **AeroChamber®** voorzetskamer kan samen met een dosisaerosol of soft mist inhalator worden gebruikt om uw voorgeschreven medicatie te inhaleren. Een voorzetskamer helpt om de inhalatie te verbeteren. Na het indrukken van de dosisaerosol worden de aerosoldruppeltjes opgevangen in de voorzetskamer. Hierdoor heeft u meer tijd om de medicatie in te ademen en worden grotere druppeltjes, die uw longen niet bereiken, gefilterd.

Heeft u vragen over het gebruik van de voorzetskamer of uw medicatie? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

OPMERKINGEN

- U hoort een fluittoon bij inhalatie wanneer u te krachtig inademt. Inhaleer minder krachtig, dan verdwijnt de fluittoon.
- Als iemand u assisteert bij uw inhalatie, kan de **Flow-Vu®** inhalatie-indicator worden gebruikt om:
 - te controleren of het masker goed op uw gezicht aansluit
 - het indrukken van de dosisaerosol te coördineren met de inademing
 - het aantal ademhalingen te tellen.
- De **Flow-Vu®** indicator beweegt naar u toe terwijl u inademt en beweegt alleen als het masker goed op uw gezicht aansluit.
- Dien niet meer dan één puf tegelijk toe in de **AeroChamber®**. Volg de instructies van uw dosisaerosol, voordat u de volgende dosis neemt.
- Meld elk ernstig gebrek van dit medische hulpmiddel aan uw behandelend arts of apotheker of aan de importeur of fabrikant van dit product.

LET OP

- Gebruik de **AeroChamber®** niet in combinatie met poederinhalatoren of vernevelaars. De **AeroChamber®** is niet ontworpen om deze medicijnen af te geven, waardoor u mogelijk niet de juiste dosis krijgt toegediend.
- Het niet juist opvolgen van de instructies van de **AeroChamber®** en van de gebruiksaanwijzing van de dosisaerosol, kan de toediening van uw medicatie beïnvloeden of tot inhalatieproblemen leiden.


WAARSCHUWINGEN

Laat de **AeroChamber®** niet onbewaakt achter bij kinderen. De **AeroChamber®** bevat kleine onderdelen die, bij onjuist gebruik of bij beschadiging, verstikking kunnen veroorzaken.

Flow-Vu® INHALATIE-INDICATOR

Beweegt mee bij inademing en geeft visuele feedback om te bevestigen dat het masker goed aansluit en het ventiel correct functioneert.

***AeroChamber® Flow-Vu®** voorzetskamer

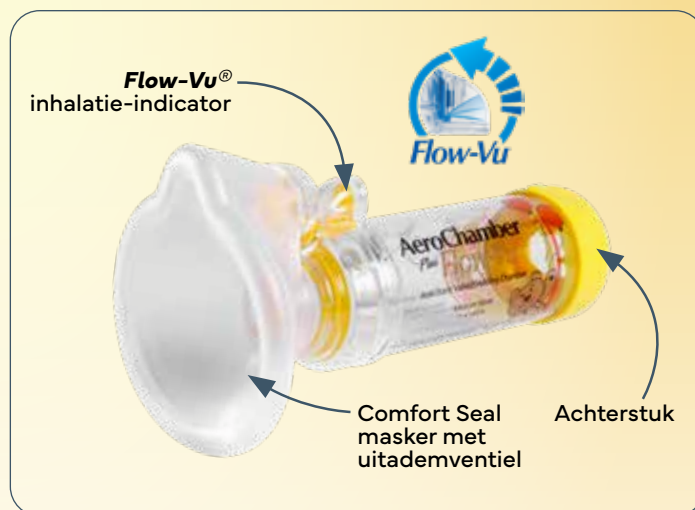

ONDERWEG



AeroChamber2go®
voorzetskamer



KINDEREN

VOLWASSENEN

Datum van de laatste herziening: mei 2026. 108720-001 Rev C. © Geregistreerde handelsmerken van Trudell Medical International (TMI).
* Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven. © TMI 2021, 2023, 2025. Alle rechten voorbehouden.
108459-001 Rev A * Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van Trudell Medical International. © TMI 2017. Alle rechten voorbehouden.
FC0912026. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.